

LINGETTES IMPRÉGNÉES D'UNE SOLUTION DÉSINFECTANTE HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LES SURFACES



PHAGO'WIPES DASR



- Prêt à l'emploi
- Large spectre désinfectant

UTILISATION

Les PHAGO'WIPES DASR peuvent être utilisées pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade. Les lingettes peuvent être utilisées, sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariots de repas, trancheurs, hachoirs, couteaux...).

Les PHAGO'WIPES DASR peuvent être également utilisées sur les jouets pour désinfection complète. Elles ne laissent pas de traces sur les surfaces.

COMPOSITION

Actif désinfectant:

Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m.

Contient aussi : eau, correcteur d'acidité.

99,90% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

TP2 - Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP4 - Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur des lingettes : bleues (réf. 460371D) ou blanches (réf. 460372A)

Odeur : alcool

pH à 20°C (produit pur) : 5 à 7

Point éclair : 23°C

MODE D'EMPLOI

Les PHAGO'WIPES DASR sont prêtes à l'emploi.

Appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.

Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide et virucide, 15 minutes pour activité fongicide.

COMPATIBILITÉ

Faire un essai au préalable sur plexiglass.

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

BACTERICIDE

EN 1040, 5 min

EN 1276 dont *S. typhimurium* et *L. monocytogenes*, 30 s

EN 13727+A2, 5 min

EN 13697 dont *S. typhimurium* et *L. monocytogenes*, 2 min

EN 16615, 1 min

FONGICIDE

EN 1275, 15 min

EN 1650, 15 min

EN 13624, 15 min

EN 13697, 5 min

EN 16615, 5 min

MYCOBACTERICIDE

EN 14348, 5 min

VIRUCIDE

EN 14476+A1 (Norovirus et Rotavirus), 15 min.

BVDV et Vaccinia virus selon DVV/RKI, 5 min.

Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (VRS inclus), orthomyxovirus, Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1, 5min.

CONSERVATION

Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

RÉFÉRENCES

460371D Boite de 200 lingettes bleues
(palette de 42 cartons de 10 boîtes)

460372A Boite de 200 lingettes blanches
(palette de 64 cartons de 10 boîtes)

